

Analyse mycologique du lait CONSEILS POUR LE PRELEVEMENT ET L'ENVOI

Echantillons	Laits individuels
Support de l'analyse	1 analyse par échantillon de lait Ou 1 analyse sur un mélange (à préciser sur le bordereau)
Quantité	40 ml (20 ml minimum) par échantillon (Remplir le flacon de prélèvement si possible)
Prélèvement	<p>Bien se laver les mains</p> <p>Nettoyer toute la surface des trayons en insistant sur l'extrémité. Utiliser pour cela, une lingette humide ou une lavette (+/- savon)</p> <p>Essuyer avec un papier à usage unique</p> <p>Jeter les premiers jets (élimination des germes situés à l'entrée du canal du trayon)</p> <p>Désinfection soigneuse des trayons avec une solution désinfectante appropriée ou une solution alcoolique ou hydro-alcoolique</p> <p>Insister sur l'extrémité des trayons</p> <p>Jeter le premier jet de lait (élimination du désinfectant présent au niveau de l'orifice)</p> <p>Collecter dans un pot à prélèvement sans toucher l'intérieur du pot (ni avec les doigts, ni avec le trayon)</p> <p>Bien remplir le pot et bien visser le bouchon</p> <p>Identifier le flacon (N° vache)</p> <p>Mettre rapidement les prélèvements au frais (4°C)</p>
Conditionnement	<p>Pot à prélèvement stérile avec bouchon à vis</p> <p>1 pot par vache</p> <p>Identifier chaque pot (N° vache)</p> <p>Envoi RAPIDE sous couvert du froid (ajout d'un pack réfrigérant dans le colis)</p> <p>Privilégier les envois en début de semaine</p> <p>JOINDRE LE BORDEREAU D'ACCOMPAGNEMENT des échantillons</p> <p>PRECISER si 1 analyse par pot ou si analyse du mélange</p> <p>(Le mélange sera réalisé au laboratoire)</p>
Adresse d'envoi	<p>MYCOSCOPIA</p> <p>3 rue Jean Monnet</p> <p>31470 Fonsorbes</p>

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter.